

Vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin) - daglig bruk og renhold

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 27.06.2018

1. HENSIKT

- Sikre gode og hygienemessig riktige rutiner rundt daglig drift og vedlikehold av vaskedekontaminatorer (instrumentvaskemaskin)

2. ANSVAR

- Seksjonsledere har ansvar for opplæring innen sitt ansvarsområde
- Pleiepersonell har ansvar for daglig bruk og renhold

3. UTFØRELSE

3.1 Programvalg:

- Velge riktig program i forhold til oppgaven maskinen skal utføre

3.2 Riktig plassering av utstyr for sikker rengjøring og desinfeksjon

- Åpne/lukke dører
- Riktig bruk av innsatser og stativer, vite om evt. klappventil
- Riktig håndtering og plassering av kirurgiske instrumenter. Instrumenter skal være demontert og åpnet
- Riktig plassering av utstyr i de forskjellige stativer, vaskefat, boller, slanger, små gjenstander, etc.
- Plassering av bestikk og servise fra isolat/smitterom

3.4 Drift og tekniske opplysninger

- Gjøre seg kjent med frontpanel og brytere/hovedbryter
- Sjekke dyser
- Sjekke og rense sil
- Sjekke såpeinntak, skifte av såpekanne, og kanne for avspenningsvæske
- Ved feilmeldinger, kontakt Driftscentralen tlf. 2823 eller meld behov i Lydia

3.5 Daglig kontroll

- Sjekk at vaskearmene roterer fritt, og alle dyseåpninger er frie for fremmedlegemer
- At klappventilen kan trykkes lett inn og ut
- Bunnfilter renses for smuss ved å løfte opp hele holderen med håndtaket som er bøyd over filteret og skylle det i utslagsvasken
- At kanner med såpe og avspenningsvæske som står i skuffen nederst i maskinen ikke er tomme
- Signer / dokumenter at oppgaven er utført på sjekklister for daglig kontroll
- Vask maskinen godt utvendig en gang pr.uke med miljøklut og vann

4. GENERELT

Vaskedekontaminatorer må ikke brukes som utslagsvask

Ved driftsproblemer – kontakt driftscentralen tlf. 2383 eller meld behov i Lydia.

5. REFERANSER

[1.6.10.2.1](#)

[Basale smittevernrutiner](#)

[1.6.10.2.6](#)

[Håndhygiene - hånddesinfeksjon, håndvask](#)

[1.6.10.7.6](#)

[Vaskedekontaminator \(instrumentvaskemaskin\) - daglig kontroll og sjekklister](#)

[1.6.10.7.7](#)

[Vaske \(instrumentvaskemaskin\) - og spyledekontaminator. Sjekklister for opplæring](#)

[1.6.10.7.11](#)

[Vaskedekontaminator og spyledekontaminator](#)
[Kvalitetsikring av rengjørings- og desinfeksjonsprosessen](#)

[2.1.5.11.5.1](#)

[Innlasting av urent gods i instrumentvaskemaskinene. Sterilsentralen.](#)