

## Alarmmatte - pasientfall, bruk

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Retningslinje  
Sist endret: 19.04.2016

### 1. HENSIKT

Sikre rett bruk av BEST sengealarm/alarmmatte

### 2. ANSVAR


Pleiepersonell på sengeposter  
Ansatte på elektroavdelingen har ansvar for reparasjoner

### 3. FREMGANGSMÅTE

#### **BRUKSANVISNING ALARMMATTE (BEST sengealarm)**

#### **Funksjon**

Sett sengealarmenheten i "FRÅN"-modus. Sengealarmenheten settes inn i et BEST anropsapparat med jack-uttak. Alarmmatten tilkoples via modularuttaket på sengealarmenhetens underside. Observer at alarmmatten normalt kan plasseres under sengens madrass. Alarmmatten skal være utstrakt fullt ut i sengen. Kople til spenningsadapteret på undersiden og plugg den deretter i nærmeste vegguttak.

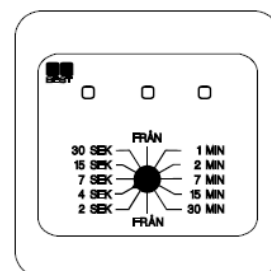

#### **Aktivering av sengealarmen**

- A** Still sengealarmenheten i "FRÅN" modus  
(Den gule lampen blinker nå, de andre er mørke).
- B** Pasienten kan nå legge/sette seg  
(Den grønne lampen lyser fast, de andre er mørke).
- C** Still ønsket tid som pasienten kan være ute av sengen/stolen før alarm går ut i.  
Om man stiller enheten til 15 sekunder kommer alarmen til å gå ut i systemet etter den tiden. (Det kan stilles inn en kort tid for pasienter som trenger dette).
- D** Når pasienten forlater seng/stol starter timeren  
(Den gule lampen blinker).
- E** Dersom pasienten ikke er tilbake innen innstilt tid går alarmen ut i anlegget  
(Den gule og den røde lampen lyser fast).

#### **Testing av sengealarm**

Alarmmatten må testes før bruk.  
Ved defekt alarmmatte meldes dette i LYDIA til elektroteknisk avdeling.

#### **Avstilling av sengealarmen:**

Avstilling av sengealarmen utføres ved å:  
**F** Avstill alarmen på rommets rompanel  
(Anropet forsvinner nå i systemet).

Gå tilbake til punkt B og fortsett der.

### 4. GENERELT

BEST Sengealarm er konstruert for å fungere i ulike BEST pasientvarslingssystemer. Sengealarmen er tenkt å være et supplement, som kan anvendes hvor og når det er behov for det, eksempelvis i seng eller stol/sofa.

BEST Sengealarmsett består av sengealarmenheten, kontaktmatte med tilkoplingskabel og et spenningsadapter for 230V vegguttak

## **5. INTERNE REFERANSER**

[1.6.5.3.1](#)

[Fall - forebygging av fallulykker hos voksne pasienter](#)

## **6. EKSTERNE REFERANSER**

## **7. VEDLEGG**