

CADD Legacy smertepumpe - Programmering kortversjon

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 02.12.2022

1. HENSIKT

Gir forenklet innføring i programmering uten å låse opp CADD-pumpen.
For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy PCA operatørmanual.

2. ANSVAR

Sykepleiere som jobber på poster som håndterer CADD Legacy
All programmering/dosejustering skal være forordnet av lege.

3. FREMGANGSMÅTE

Stopp og start:

Pumpen er laget slik at START/STOPP knappen må holdes inne en tid før den virker. Tre streker (---) vil komme til syne ved stopp.

Programmering innenfor gitte grenseverdier:

Programmering av hastighet/dose/sperretider kan foretas innenfor gitte rammer (grenseverdier) uten å låse opp/igjen pumpa. Omprogrammering skal være ordinert av lege.

Stopp pumpen

Bruk NESTE knappen til du kommer til den innstillingen som skal endres /vanligvis kontinuerlig hastighet/bolus)

Still inn ønsket verdi ved hjelp av piltastene.

Trykk BEKREFT/SLETT for å bekrefte nye verdier.

Start pumpen (trykk STOPP/START – tre streker (---) vil forsvinne fra displayet.

Dokumenter omprogrammeringen i smertepumpeskjema [Smertepumpeskjema for CADD Legacy/infusor](#)

4. GENERELT



Hvis problemer:

Kontakt Lindrende poliklinikk
mandag – fredag 08 – 15.30
Tlf 33 34 11 71

Kveld/helg
Onk/pal sengepost
Tlf 33 34 11 72

Ambulant palliativt team
Mandag – fredag 08-15.30
Tlf. 90 53 07 93

5. INTERNE REFERANSER

- [1.6.1.18.4](#) [Pasienter som skrives ut med CADD smertepumpe eller infusor - en veileder](#)
- [1.6.1.18.5](#) [Smertepumpeskjema for CADD Legacy/infusor](#)
- [1.6.1.18.6](#) [Smertepumpeskjema for MP Daily+](#)
- [1.6.1.18.7](#) [Bruk av CADD - Legacy smertepumpe/infusor](#)
- [1.6.1.18.8](#) [Smertepumpe. Bruk av MP Daily+](#)

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG

