

## CADD Legacy Smertepumpe - bruk av blindkassett

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Prosedyre  
Sist endret: 26.01.2023

### 1. HENSIKT

Prosedyren beskriver bruk av blindkassett og infusjonspose. Blindkassett brukes dersom medikamentblandingen leveres i infusjonspose i stedet for kassett. Enkelte medikamentblandinger finnes som en standardisert blanding i infusjonsposer, eller det kan være høyt forbruk av kassetter, og det vil være mer hensiktsmessig med infusjonsposer som rommer ett høyere volum. For ytterligere informasjon henvises til CADD Legacy PCA operatørmanual

### 2. ANSVAR

Sykepleier som jobber på poster som bruker CADD Legacy

### 3. FREMGANGSMÅTE

#### Stopp og start:

Pumpen er laget slik at START/STOPP knappen må holdes inne en tid før den virker. Tre streker (---) vil komme til syne ved stopp.

#### Aseptisk teknikk:

Ved tilkobling av blindkassett og infusjonspose brukes "non.touch" teknikk (ikke ta på teknikk) Etter grundig håndvask håndteres koblingene med sterile kompresser fuktet med klorhexidin 5 mg/ml.



#### Tilkobling av blindkassett ved bruk av infusjonspose med medikamenter:

##### Utstyr:

Ny infusjonspose – sjekk at pasient opplysninger og innhold stemmer.  
Sterile kompresser 10 x10 cm til å håndtere koblinger ved tilkobling.

Klorhexidinprit 5 mg/ ml liniment oppløsning.

10 ml sprøyte

Opptrekkspiss

### Skifte av infusjonspose uten å skifte blindkassett:

- Stopp pumpen
- Vask tilsetningsstussen med klorhexidin 5 mg/ml
- Ta ut luft av ny infusjonspose – bruke 10 ml sprøyte og opptrekksspiss. **NB! Viktig at all luft trekkes ut for å unngå at det blir luft i settet.** Ved infusjonsposer som er tilberedt av sykehusapoteket vil luft allerede være fjernet.



- Ta ut tilkoblingsspissen fra gammel infusjonspose – bruk sterile kompresser fuktet med klorhexidin 5 mg/ml - og sett inn i den nye
- Trykk på NESTE for å se på kassettvolum på displayet
- Trykk BEKREFT/SLETT og volumet tilbakestilles till 100 ml. Hvis volumet i infusjonsposen er mer enn 100 ml – bruk piltast opp. Bekreft ny verdi.
- Bruk NESTE knappen for å gå igjennom menyen og null ut bolusdoser og totalt infudert med BEKREFT/SLETT knappen.
- Start pumpen. Tre streker(---) vil forsvinne fra vinduet, pumpen er da startet. Display viser; INF KasVol 100 ml (evt. mer hvis volumet er større)

### Hvis blindkassett skiftes:

- Stopp pumpen
- Ta ut luft av ny infusjonspose som beskrevet over.
- Steng slangeklemmen på gammel blindkassett
- Bruk nøkkel, koble av gammel kassett, alarm vil høres – for å stoppe alarmen trykk en gang på START/STOPP knappen
- Sett på ny blindkassett som kobles til ny infusjonspose
- Fyll slangen (og evt filter) ved å trykke inn FYLL SETT knappen til tre streker vises i displayet. Slipp knappen og trykk den inn igjen. Pumpen fyller nå slangesettet. Det må trykkes flere ganger på knappen for å få væske helt ut i enden.
- For å komme tilbake til normal meny - trykk en av de andre knappene
- Fukt sterile kompresser med sprit, tørk av koblingen som skal åpnes. Beskytt koblingen med kompress når du setter på nytt slangesett/filter.
- Åpne klemmen på ny blindkassett hvis den er stengt
- Følg instruks over for å tilbakestille volum og nulle bolus/totalt infudert.
- Start pumpen

Dokumenter skifte av infusjonspose på smertepumpeskjema [Smertepumpeskjema for CADD Legacy/infusor](#)

#### 4. GENERELT

Blindkassett skiftes en gang i uka både ved spinalkateter og sc. infusjon.



#### Hvis problemer:

Kontakt Lindrende poliklinikk  
mandag – fredag 08 – 15.30  
Tlf 33 34 11 71

Kveld/helg  
Onk/pal sengepost  
Tlf 33 34 11 72

Ambulant palliativt team:  
Mandag – fredag 08 – 15.30  
Tlf 90 53 07 93

#### 5. INTERNE REFERANSER

- [1.6.1.18.4](#) [Pasienter som skrives ut med CADD smertepumpe eller infusor - en veileder](#)
- [1.6.1.18.5](#) [Smertepumpeskjema for CADD Legacy/infusor](#)
- [1.6.1.18.7](#) [Bruk av CADD - Lecacy smertepumpe/infusor](#)
- [1.6.1.18.9](#) [CADD Legacy smertepumpe - Programmering kortversjon](#)
- [1.6.1.18.10](#) [CADD Legacy smertepumpe - skifte av kassett kortversjon](#)

#### 6. EKSTERNE REFERANSER

#### 7. VEDLEGG