

CADD Solis - Endre en programinnstilling mens pumpen går

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 02.09.2022

1. HENSIKT

Prosedyren gir en forenklet innføring i å endre programinnstilling til CADD Solis. For fullstendig informasjon henvises det til brukerhåndboken for CADD Solis.

2. ANSVAR

Sykepleiere som jobber på poster som håndterer CADD Solis. All programmering/dosejustering skal være forordnet av lege.

3. FREMGANGSMÅTE

1. Trykk **Stopp/start** knappen.
2. Trykk så knappen under **Oppgaver**.
3. Scroll nedover ved hjelp av piltastene til **Vis infusjonsinnstillinger**. Trykk så **Velg**.
4. Velg deretter den innstillingen du vil forandre. Trykk **Velg**. Ønsket innstilling utheves. Tast inn sikkerhetskode for å fortsette. Koden er 921. Du kan deretter forandre verdi ved bruk av piltastene og så trykke **Lagre** for å lagre forandring.
5. Dine endringer er lagret. Trykk **Stopp/start** knappen.
6. Pumpen vil så be deg om å **Gå igjennom pumpeinnstillinger**, velg **Gå igjennom**.
7. Du må deretter bekrefte alle innstillinger ved å trykke **Akseptér verdi**. Grønn hake vises ved hver innstilling som en bekreftelse.
8. Så snart innstillingene er bekreftet vises **Starte Pumpe?** Trykk **Ja**.



4. GENERELT

Hvis problemer:

Kontakt Lindrende poliklinikk
mandag – fredag 08 – 15.30
Tlf 33 34 11 71

Kveld/helg
Onk/pal sengepost Tlf 33 34 11 72

Ambulant palliativt team
Mandag – fredag 008-15.30
Tlf. 90 53 07 93



Kilder:

Bruksanvisning Cadd Solis VIP.Norsk.pdf
Hurtigguide Cadd Solis VIPNO.pdf
Se Medusa

5. INTERNE REFERANSER

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.6.1.18.14 | CADD Solis - Programmering av ny pasient PCA |
| 1.6.1.18.16 | CADD Solis - skifte kassett og fylle slange |
| 1.6.1.18.17 | CADD Solis - Stille inn harde og mye grenser for levering. |
| 1.6.1.18.18 | CADD Solis - Lese av bolus/ rapporter |

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG

