

CADD Solis - skifte kassett og fylle slange

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 02.09.2022

1. HENSIKT

Å gi en enkel innføring i hvordan skifte kassett og fylle slange på CADD Solis pumpen. For fullstendig informasjon henvises det til brukerhåndboken til CADD Solis.

2. ANSVAR

Sykepleiere som jobber på poster som håndterer CADD Solis. All programmering/dosejustering skal være forordnet av lege.

3. FREMGANGSMÅTE

1. Kontroller at infusjonen er stoppet og steng slangeklemmen.
2. Sett i nøkkelen og vri mot venstre til åpen posisjon.
3. Trykk ned kassettsperren til kassetten løsner fra pumpen
4. Sett kassetthakene til den nye kassetten i gjengene på pumpens underside.
5. Trykk fast kassetten til pumpen uten å røre kassettsperren. Det skal høres et klikk når kassetten er på plass.
6. Sett kassettsperren til stengt posisjon.
7. Lås kassetten fast ved bruk av nøkkelen. Vri mot høyre.
8. Du får spørsmål om du vil stille reservoarvolum tilbake til 100 ml. Trykk ja. Hvis skjermen ikke viser dette spørsmålet, finner du funksjonen i menyen **Oppgaver**. Bruk piltastene til du kommer til valget **Tilbakestilling av reservoarvolum** (dette valget ligger i øverste linje). Velg dette.
9. Displayet viser **Fylle infusjonsslangen?** Velg **Ja**.



10. Her må du oppgi koden 201 før du fyller.
11. Velg **Fyll**. Det er ikke nødvendig å holde knappen inne for å fyller settet. Trykk **Stopp fyller** når du ser at slangen er full. Hvis skjermen ikke viser dette spørsmålet, finner du funksjonen i menyen **Oppgaver**. Bruk piltastene til du kommer til valget **Fyll sett**.
12. Koble så på pasienten og start pumpen.

4. GENERELT

Hvis problemer:

Kontakt Lindrende poliklinikk
mandag – fredag 08 – 15.30
Tlf 33 34 11 71

Kveld/helg
Onk/pal sengepost Tlf 33 34 11 72

Ambulant palliativt team
Mandag – fredag 008-15.30
Tlf. 90 53 07 93



Kilder:

Bruksanvisning Cadd Solis VIP.Norsk.pdf
Hurtigguide Cadd Solis VIPNO.pdf
Se Medusa

5. INTERNE REFERANSER

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.6.1.18.14 | CADD Solis - Programmering av ny pasient PCA |
| 1.6.1.18.15 | CADD Solis - Endre en programinnstilling mens pumpen går |
| 1.6.1.18.17 | CADD Solis - Stille inn harde og mye grenser for levering. |
| 1.6.1.18.18 | CADD Solis - Lese av bolus/ rapporter |

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG

