

## CADD Solis - Stille inn harde og mye grenser for levering.

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: []  
Sist endret: 02.09.2022

### 1. HENSIKT

Sikre korrekt administrasjon av medikamenter gitt som kontinuerlig infusjon via CADD Solis, sikre at grenseverdier i pumpen stilles inn korrekt slik at hjemmesykepleien eller andre som skal administrere pumpen kan endre innstillingene om nødvendig.

### 2. ANSVAR

Sykepleiere på poster på SiV og i hjemmetjenesten som bruker CADD Solis.

### 3. FREMGANGSMÅTE

1. Slå på pumpen med strømbryteren på siden av pumpen.




2. Trykk på knappen under «oppgaver».



3. Gå til menyen **Avanserte oppgaver**.



4. Trykk piltastene opp eller ned til du finner **Harde og myke grenser for inf** og velg denne.

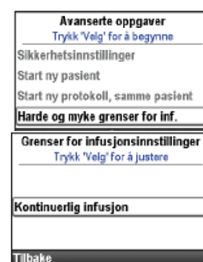

5. Trykk igjen piltastene til innstillingen du vil justere og trykk velg, her kontinuerlig infusjon.

6. Lås opp tastaturet. Kode: 921.

7. Trykk piltastene for å bla til og utheve innstillingene du vil justere og trykk **Velg**.



8. Trykk piltastene opp eller ned for å øke eller redusere grensen for innstillingen og trykk deretter **Lagre**.

9. Fortsett å bla igjennom innstillingene til du har satt grenser for alle verdier du ønsker å stille inn. Velg **tilbake** for å gå tilbake til menyen **Grenser for infusjonsinnstillinger**. Trykk piltastene for å bla til andre innstillinger du ønsker å justere, eller trykk **Tilbake** for å avslutte. Tilbakeknappen trykkes inn flere ganger til du kommer til bildet **Kontinuerlig**. Start pumpen. Bildet **Gå igjennom pumpeinnstillinger** vises. Trykk på knappen under **Gå igjennom**. Sett inn kode 921. Trykk på knappen under **Aksepter verdi** på alle innstillingene nedover. Det vil da vises en grønn hake ved hver verdi før du tilslutt får spørsmål **Starte pumpe?**
10. Start pumpen.

#### 4. GENERELT

##### Hvis problemer:

Kontakt Lindrende poliklinikk  
mandag – fredag 08 – 15.30  
Tlf 33 34 11 71

Kveld/helg  
Onk/pal sengepost Tlf 33 34 11 72

Ambulant palliativt team  
Mandag – fredag 008-15.30  
Tlf. 90 53 07 93



##### Kilder:

Bruksanvisning Cadd Solis VIP.Norsk.pdf  
Hurtigguide Cadd Solis VIPNO.pdf  
Se Medusa

#### 5. INTERNE REFERANSER

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <a href="#">1.6.1.18.14</a> | <a href="#">CADD Solis - Programmering av ny pasient PCA</a>             |
| <a href="#">1.6.1.18.15</a> | <a href="#">CADD Solis - Endre en programinnstilling mens pumpen går</a> |
| <a href="#">1.6.1.18.16</a> | <a href="#">CADD Solis - skifte kassett og fylle slange</a>              |
| <a href="#">1.6.1.18.18</a> | <a href="#">CADD Solis - Lese av bolus/ rapporter</a>                    |

#### 6. EKSTERNE REFERANSER

#### 7. VEDLEGG