

Thopaz - digitalt vakuumsug

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 25.07.2022

1. HENSIKT

Sikre riktig bruk av Thopaz – digitalt vakuumsug

2. ANSVAR

Sykepleier

3. FREMGANGSMÅTE

3.1 KLARGJØRING OG OPPSTART

- Koble slangen til apparatet



- Kontroller at pakningen rundt inngangen til høyre for slangekoblingen er på plass
- Koble beholder til apparatet
- Slå på apparatet
- Spørsmål: Ny pasient, velg ja eller nei
- Apparatet står i Standby modus

3.2 FUNKSJONSTEST

Funksjonstest skal alltid utføres før tilkobling til pasientdren.

Slå på



Standby modus

Thopaz Thorax Drainage

Ny pasient?

Nei Ja

low vacuum / low flow

Behandlingsnummer

Behandlingsnummer

trykk - 2.0 kPa

2 på

low vacuum / low flow

Behandlingsnummer

Slå ikke på thopaz hvis pasienten allerede er tilkoblet.

- Velg ordinert trykk ved å holde begge de nederste piltastene inne samtidig. Juster trykket opp og ned med piltastene på høyre side
- Trykk venstre piltast for å komme tilbake
- Trykk "på", høyre piltast
- Observer at flyten beveger seg oppover

- Hold over konnektor på pasientslangen med tommel (inne i posen)
- Observer at flyten beveger seg nedover. Da er systemet tett og kobling korrekt
- Sett apparatet i standby modus ved å holde venstre piltast nede i minst 3 sekunder.
- Koble konnektor til dren og trykk "på" fra standby modus. Da er pasienten klar for behandling

3.3 SKIFTE BEHOLDER


- Klem av slange med slangeklemme
- Hold venstre piltast nede i minst 3 sekunder
- Skift beholder




- Trykk "på"
- Åpne slangeklemmen
- Sjekk flytverdi
- Brukt beholder proppes igjen med medfølgende propp og kastes i risikoavfall

3.4 DIGITAL GRAF

- Digital graf viser utslipp av luft siste 24 timer, viser status pr nå i display og siste 24 timer i graf modus
- Kan zoome med piltaster
- Grafen vises svakt etter 10 minutter. Først etter 4 timer, mer fremtredende

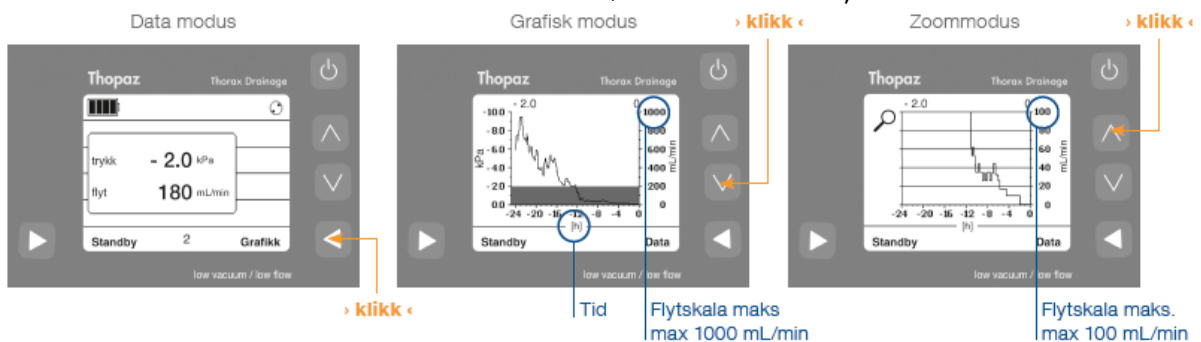


- Kan se indikasjon på åpent eller tett dren i graf modus (kun i flyt = 0 ml/min)

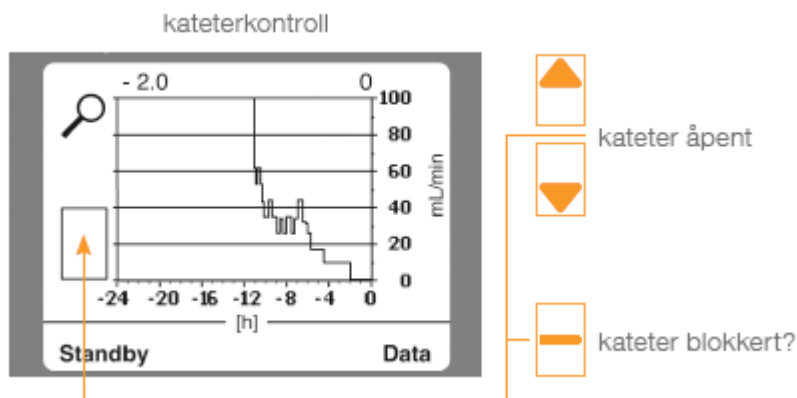

3.5 ALARM

- Avstill alarm ved å trykke ned begge piltaster på høyre side, samtidig

Alarmstyring (f.eks. system tett)

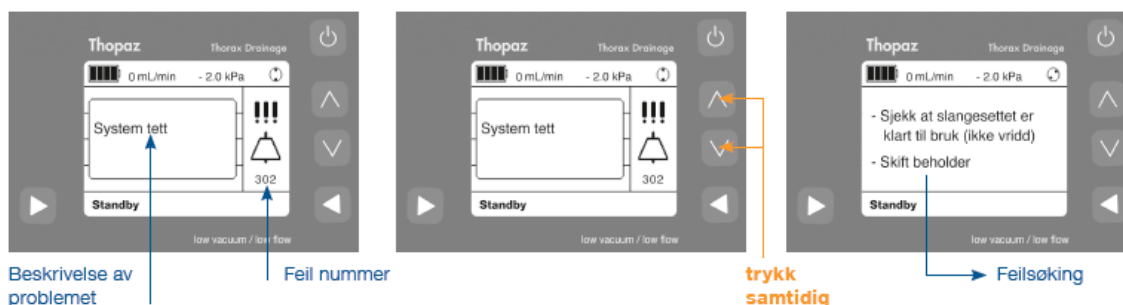

- Ca 30 minutter før batteriet er tomt, går det en alarm og batterisymbolet blinker. Apparatet må da lades så raskt som mulig. 10 minutter før batteriet er tomt, går det en alarm som ikke lar seg skru av

3.6 SLÅ AV

- Sett apparatet i standby modus, deretter et lett trykk på av-knappen

Slå av



4. GENERELT

- Renhold: Oppvasksåpe og vann
- Sugekapasitet: 5 liter/minutt
- Maks. vakuüm: -10 kPa/-100cmH₂O
- Vekt: 1 kg
- Batterikapasitet: 4 - 10 timer avhengig av innstillinger

5. INTERNE REFERANSER

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG

