

CADD Solis - Lese av bolus/ rapporter

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 02.09.2022

1. HENSIKT

Å gi en enkel innføring i hvordan lese av bolus og andre rapporter på CADD Solis pumpen.

For fullstendig informasjon henvises det til brukerhåndboken til CADD Solis.

2. ANSVAR

Sykepleiere som jobber på poster som håndterer CADD Solis.
All programmering/dosejustering skal være forordnet av lege.

3. FREMGANGSMÅTE


Rapportene kan leses av når som helst, både når pumpen går og når den er stoppet.

1. I menyen **Oppgaver** brukes piltastene for å markere Vis rapporter. Trykk velg.
2. Bruk så piltastene for å markere hvilke rapport du vil se og trykk velg.

3. Bolus: Velg **Totalt gitt dose og PCA-bolus**.
Dokumenter antall bolus.



4. Bruk piltastene og velg **Slett gitt volum** eller **Slett bolus** for å slette telleren. Dette oppdaterer også tid og dato på dette skjermbildet. I pumpen finner man også en graf for PCA-bolus.

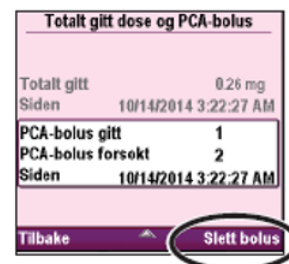

- Om det er andre rapporter du ønsker å se, velges dette tilsvarende.

Antall ml igjen i pumpen vil alltid vises øverst i pumpens venstre hjørne.



- Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til skjermen som viser valg av rapporter. Trykk **Tilbake** igjen for å komme til første skjermbilde.

4. GENERELT

Kilder:

Bruksanvisning Cadd Solis VIP.Norsk.pdf

Hurtigguide Cadd Solis VIPNO.pdf

Se Medusa

5. INTERNE REFERANSER

[1.6.1.18.14](#)

[CADD Solis - Programmering av ny pasient PCA](#)

[1.6.1.18.15](#)

[CADD Solis - Endre en programinnstilling mens pumpen går](#)

[1.6.1.18.16](#)

[CADD Solis - skifte kassett og fylle slange](#)

[1.6.1.18.17](#)

[CADD Solis - Stille inn harde og mye grenser for levering.](#)

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG

