

## SecurAcath®. Festeordning for piccline og andre SVK. Stell og fjerning.

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Retningslinje  
Sist endret: 14.08.2019

### 1. HENSIKT

Retningslinjen omhandler stell og fjerning av SecurAcath® slik at man sikrer best mulig fiksering, stell og fjerning av SecurAcath®.

### 2. ANSVAR

Sykepleier/Hjemmesykepleier er ansvarlig for stell og fjerning av kateter fiksert med SecurAcath®. Selve innleggelsen gjøres av anestesipersonell og omhandles ikke i denne retningslinjen.


### 3. FREMGANGSMÅTE

- **Stell** av kateter og innstikkssted følger [vanlige retningslinjer angitt i EK](#). I tillegg gjelder følgende ved stell av kateter fiksert med SecurAcath®:

Løft kateteret forsiktig rett opp uten å vri, dra eller rotere i SecurAcath®. Man steller omkring innstikkssted som angitt i [retningslinje](#).



- **Fjerning.** Ta av overdelen av SecurAcath®; hold på underdelen og samtidig løft opp kanten på overdelen.
- Dra kateteret forsiktig ut av blodåren, slik at kun SecurAcath® er igjen.

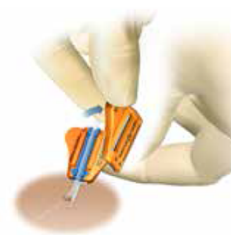

- Klipp langs den blå midtdelen med en saks slik at SecurAcath® deles i 2 deler.

- Fjern SecurAcath® ved å dra hver halvdel bestemt ut av huden.



#### **4. GENERELT INDIKASJONER**

- SecurAcath® legges inn i forbindelse med kateterinnleggelse.
- Fiksering av intravasale katetere av forskjellige slag (blant annet picclines) skal i størst mulig grad forhindre aksidentell fjerning/dislokasjon av disse ved stell.
- SecurAcath® er en festeandordning for picclines og andre intravasale kateter som er forventet å ligge noe tid. SecurAcath® skal hindre at kateteret glir ut ved uhell og forenkle stell av kateteret.
- Festeandordningen klipses på kateteret ved innstikkstedet og forankres under huden gjennom stikk-kanalen via 2 små metallpinner som fungerer som mothakere i det subkutane vev.
- Den beholdes inne så lenge kateteret ligger og trenger ikke å byttes. Den fjernes kun når kateteret fjernes.

#### **5. INTERNE REFERANSER**

[1.6.2.6.2.4](#)

[PICC-line - håndtering og fjerning av perifert innsatt sentralvenøst kateter \(SVK\)](#)

[1.6.2.6.2.5](#)

[PICC-line - innleggelse av perifert innsatt sentralvenøst kateter \(SVK\)](#)

[2.1.5.1.1.2.2.62](#)

[Sentralt venekateter \(SVK\) - Innleggelse](#)

#### **6. EKSTERNE REFERANSER**

#### **7. VEDLEGG**

