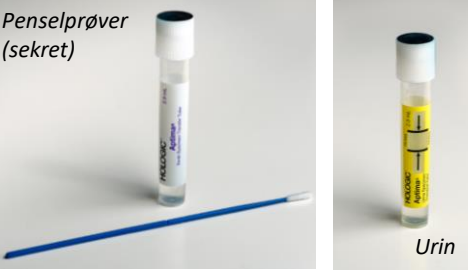
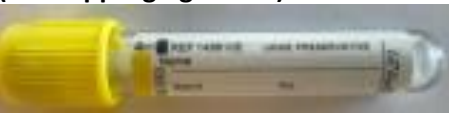


Prøvetakingsutstyr	Bruksområde	Merknad
Amies transportmedium  Tykk pensel (sort kork) Tynn pensel (oransje kork)	Dyrkning av bakterier og sopp (ikke dermatofytter). Mediet kan <u>ikke</u> benyttes til forsendelse av prøver til PCR, antigenpåvisning eller direkte mikroskopi.	Amies transportmedium med tykk eller tynn pensel; pensel velges etter behov. <i>Tykk pensel:</i> får med mest materiale og anbefales om mulig. Velegnet for sår, MRSA o.l. <i>Tynn pensel:</i> ved behov for å komme til i små åpninger, som nasopharynx, urethra o.l.
Transwab transportmedium  Tykk pensel (lilla kork)	- MRSA hurtigtest (isolerte pasienter) - Screening ESBL/VRE - Screening CMV (spyttprøve nyfødt)	MRSA: for å avklare behov for isolering av inneliggende pasienter. For ordinær MRSA-screening brukes Amies transportmedium med tykk pensel.
Transwab transportmedium  Tynn pensel (lyseblå kork)	- Luftveisagens: Koronavirus, Influenzavirus, RS-virus, Metapneumovirus, Rhinovirus, Adenovirus, Bordetella pertussis/parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. - PCR Herpes simplex virus og Varicella zoster virus	Luftveisagens: Nasopharynx-prøve anbefales. La penselen ligge i nasopharynx i ca. 10 sekunder, slik at svaben kan suge til seg væske før den puttes i transportmediet. Herpes/Varicella: prøve tas fra vesikkel.
Aptima medium for SOS  Penselprøver (sekret) Urin	SOS=seksuelt overførbart sykdom - Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) - Mycoplasma genitalium (indikasjon må spesifiseres) - Ureaplasma urealyticum (indikasjon må spesifiseres)	Penselprøve (sekret genitalia): Hvit pensel benyttes til å fjerne slim før prøvetaking, mens blå unisexpensel benyttes til selve prøvetakingen. Se forpakning for mer info om prøvetaking. Urin: Førststråleurin tilsettes opp til markering på glasset (ca. 2mL) innen 24 timer. Borsyreurin kan ikke benyttes.
Urinit borsyrerør 4 mL (med oppsugingsenhet) 	Urin til dyrkning av bakterier og sopp	Urin midtstråle suges opp i borsyrerøret vha medfølgende oppsugingsenhet. Vakum i røret sørger for riktig volum Røret vendes 8-10 ganger.
Universalcontainer uten tilsetning 	- Flytende materiale, biopsier o.l. til mikrobiologisk undersøkelse - Hud, hår, negler for dyrkning av sopp og dermatofytter	Urin til dyrkning: benytt borsyrerør. Biopsier til dyrkning: fyll på med sterilt saltvann slik at biopsien dekkes.

Se «Laboratoriehåndbok Sykehuset i Vestfold» www.siv.labfag.no for mer informasjon om de ulike analysene innen mikrobiologi.

DIPS SiV: gå til «Hjelp» – «Laboratoriens analyseoversikt (felles)».

Intranett SiV: benytt «Analyseliste og laboratoriehåndbok», høyre kolonne på hovedsiden.

Sykehusets hjemmeside www.siv.no: «Fag og Forskning» – «Laboratorietjenester» – «Laboratoriehåndbok SiV med analyseliste».

Prøvetakingsutstyr	Bruksområde	Merknad
Fecal transwab 	Avføringsprøve til: - Tarmpatogene bakterier - Parasitter - Tarmpatogene virus.	Penselen kan brukes direkte i avlagt avføring eller føres 1-2 cm inn i pasientens endetarm (ikke forbi rødt merke på penselen). Det må være synlig avføring på pensel. Angi klinikk og eventuell reiseanamnese.
Avføringsglass med skje 	Avføringsprøve til: - Clostridioides difficile toksin - Innvollsorm/ikter mikroskopi (spesiell indikasjon).	<i>Hvis det er forhold som gjør det vanskelig å bruke Fecal transwab, kan avføringsglass med skje (uten tilsetning) unntaksvis benyttes.</i>
Bactec flasker/blodkulturflasker 	Til dyrkning av bakterier og gjærsopp fra blod, tatt direkte på blodkulturflasker. Kan også benyttes til dyrkning av flytende prøvemateriale fra sterile områder, som ascites, pleuravæske m.fl.	Oppbevares i romtemperatur både før og etter prøvetaking.
Spinalvæskesett 	Mikrobiologisk avd: bakteriologisk undersøkelse, Borrelia-antistoff og virus-PCR. Sentrallaboratoriet: celletelling, totalprotein, glukose og IgG-isoelektrisk fokusering	Spinalvæskesettet inneholder 5 rør pakket i pose, hvor bruksområde og tapperekkefølge er avmerket på forsiden av posen. Settene fås ved Mikrobiologisk avdeling/kan hentes i kjøleskapet ved avdelingen.
Serum med gel (rød/gul kork) 	- Infeksjonsserologi (antistoff/antigen-undersøkelser) - Rheumaserologi	
EDTA (lilla/sort kork) 	- HLA B27 PCR	Fullblod; skal <u>ikke</u> sentrifugeres
EDTA med gel (hvit/gul kork) 	- Hepatitt C virus (HCV) PCR (kvantitering) - Cytomegalovirus (CMV) PCR (kvantitering)	Plasma; må sentrifugeres innen 6 timer

Se «Laboreriehåndbok Sykehuset i Vestfold» www.siv.labfag.no for mer informasjon om de ulike analysene innen mikrobiologi.

DIPS SiV: gå til «Hjelp» – «Laboratoriens analyseoversikt (felles)».

Intranett SiV: benytt «Analyseliste og laboreriehåndbok», høyre kolonne på hovedsiden.

Sykehusets hjemmeside www.siv.no: «Fag og Forskning» – «Laborerietjenester» – «Laboreriehåndbok SiV med analyseliste».