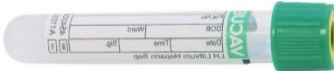


Gje
Dok
Sist

RØRTYPE	REKKEFØLGE	VENDES	SENTRIFUGERING	OPPBEVARING
Citratrør Koagulasjonsanalyser Blå kork		8 - 10 ganger	Sentrifugeres ikke	Romtemperatur
Rør uten tilsetning Legemidler Rød kork		8 - 10 ganger	Etter 30 minutter (Innen 2 timer)	Kjøleskap
Gelrør (SST) Serumanalyser Gul kork		8 - 10 ganger	Etter 30 minutter (Innen 2 timer)	Kjøleskap
Gelrør (RST) Glukosebelastning Oransje kork		8 - 10 ganger	Etter 10 minutter	Kjøleskap
Heparinrør (Na-Heparin) Tungmetaller (Bly, Kadmium, Kvikksølv) Mørkegrønn kork		8 - 10 ganger	Sentrifugeres ikke	Romtemperatur
Heparinrør med gel (Li-Heparin) Spormetaller (Sink, Selen, Kobber, Aluminium) Lysegrønn kork med gul ring		8 - 10 ganger	Etter 30 minutter (Innen 2 timer)	Romtemperatur

EDTA-rør (4 ml) Hematologi, HbA1c med flere Lilla kork		8 - 10 ganger	Sentrifugeres ikke	Romtemperatur evt. kjøleskap over natt (obs: ikke under 4°C)
EDTA-rør (6 ml) Kun svangerskapsanalyser Lilla kork		8 - 10 ganger	Sentrifugeres ikke	Kjøleskap
EDTA-rør med gel EDTA-plasma Hvit kork med gul ring		8 - 10 ganger	Innen 2 timer	Kjøleskap

Holdbarhet for enkeltanalyser: se analyselisten i vår laboratoriehåndbok på siv.labfag.no